

## Cómo utilizar la bicicleta Fun2Go

## How to use the Fun2Go



La Fun2Go está cerrada con cerradura. Para abrir entre la llave y gírala. La cerradura desbloquea, la llave queda dentro. Para cerrar: gira la llave mientras cierre la cerradura.

*The Fun2Go can be closed by a lock. To open, enter the key and turn it slightly. The lock will open. To close: turn the key slightly and close the lock.*



La silla del acompañante es giratoria. La palanca se encuentra al lado derecha.

*The passenger's seat can be turned for easy access. You'll find the handle on the right.*



La silla del acompañante lleva reposabrazos. Para facilitar el acceso, sube los reposabrazos.

*The passenger's seat has armrests. For easy access you can raise them.*



Las sillas se pueden deslizar delante y detrás mediante la palanca que se encuentra delante derecha.

*The seats can be adjusted forwards and backwards by the handle on the right.*



Se encuentra el freno de mano en el manillar del conductor principal.

*You'll find the handbrake at the handlebar of the main driver.*



La bicicleta Fun2Go es terapéutica. El conductor principal puede elegir la forma en que el acompañante pedalea. 1: no puede pedalear. 2: puede pedalear, pero no es obligatorio. 3: tiene que pedalear.

*The Fun2Go is a therapeutic bike. The main driver can select whether or not the passenger can pedal. 1: cannot pedal, 2: can pedal, 3: obligation to pedal.*



La Fun2Go tiene 7 marchas. Para cambiar de marcha **PARA** un momento de pedalear, cambia de marcha y continúe de pedalear. **NO CAMBIAS DE MARCHA PEDALEANDO.**

*The Fun2Go has 7 gears. To change gears STOP pedalling, change gear, and start pedalling again. DO NOT CHANGE GEARS WHILE PEDALLING.*



Esta versión lleva motor eléctrico asistido. El primer botón es para encender/apagar y los botones 1,2 y 3 es la fuerza del motor.

*This version has motor assistance. Press the on/off button to activate/deactivate. Select the force you want, pressing 1,2 and 3.*